



GEBRAUCHSANWEISUNG

EISENMANGEL TEST



BITTE BEACHTEN SIE GENAU DIE GEBRAUCHS- ANWEISUNG

Ergebnisse können sonst verfälscht dargestellt werden und bieten somit keine Garantie für eine genaue Analytik.

HINWEISE ZUM PROBENVERSAND:

Deutschland: Montag bis Donnerstag

Ausland: Montag bis Mittwoch

Der Versand sollte nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen erfolgen.

Schritt 1:

WICHTIGE HINWEISE

- Eisenpräparate sollten eine Woche vor Probennahme ausgesetzt werden.
- Führen Sie den Test **nüchtern** durch, am besten in den Morgenstunden nach dem Aufstehen.
- Des Weiteren bitten wir Sie, bei der Durchführung des Tests **auf einen zügigen Ablauf zu achten**, damit keine vorzeitige Gerinnung stattfindet.
- Bitte entnehmen Sie die beiden Lanzetten, die zwei Alkoholtupfer, den Trockentupfer und das Pflaster den Verpackungen und legen Sie diese Materialien für die Probenentnahme bereit.
- Um den Blutfluss zu optimieren, ist es günstig den Finger unterhalb der Herzhöhe zu halten. Außerdem sollte Sie die Punktionsstelle nach unten positionieren, so dass das Blut einen Tropfen bilden kann. Bei umgekehrter Haltung würde das Blut auf der Haut wegfließen und keinen Tropfen bilden.
- Es könnte erforderlich sein, dass Sie die Fingerspitze sanft pressen, um den Blutfluss zu verstärken. **Aber Vorsicht! Vermeiden Sie zu starkes Pressen.** Zu fester Druck vergrößert die Wahrscheinlichkeit, dass die roten Blutkörperchen hämolysieren und die Blutprobe mit Gewebeflüssigkeit kontaminiert. Sollte exzessives Pressen notwendig sein, um eine ausreichende Blutmenge zu bekommen, sollten Sie den Vorgang abbrechen und nach dem Vorwärmen an einer anderen Stelle von vorne beginnen.
- **Waschen Sie die Hände** mit Seife und warmem Wasser, um eine gute Durchblutung der Hände zu gewährleisten.
- Trocknen Sie sich die Hände mit einem **sauberen und trockenen Tuch** ab.

Schritt 2: **VORBEREITUNG**

Prüfen Sie das Testset auf Vollständigkeit.

Sollten Komponenten aus dem Testset fehlen, melden Sie sich gerne bei uns. Wir werden Ihnen umgehend Ersatzmaterial zukommen lassen. Dies gilt natürlich auch für beschädigte Ware.

Schritt 3: **DURCHFÜHRUNG**

Die Anleitung zur Durchführung dieses Tests finden Sie im Innenteil dieses Dokuments.

Schritt 4: **TESTREGISTRIERUNG**

Die Anleitung zur Testregistrierung dieses finden Sie ebenfalls im Innenteil dieses Dokuments.

Schritt 5: **VERSAND**

Bitte werfen Sie die Probe bei mehr als 25°C und kälter als 4°C nicht in den Briefkasten, sondern geben Sie die Probe in der Postfiliale ab.

Der Versand sollte von Montag bis Donnerstag, nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen erfolgen. Aus Österreich sollte der Versand Montag bis Mittwoch, nicht vor Feiertagen erfolgen. Bringen Sie die Proben noch am Tag der Probenahme zur Post.

Inhalt

1 Probenbegleitschein




1 Versandgefäß mit
1 Blutentnahmeröhrchen



1 medivere-Folienverpackung
mit 3 Lanzetten,
1 Alkoholtupfer,
und 1 Pflaster



1 Trockentupfer

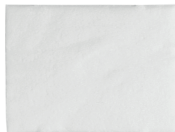

1 Versandtasche



Mit dem Scannen dieses QR-Codes erhalten Sie Zugang zu den Gebrauchsanweisungen der Komponenten der einzelnen Hersteller.

www.medivere.de/gebrauchsanweisungen

Schritt 3:



DURCHFÜHRUNG

Nachdem Sie den Abschnitt „Wichtige Hinweise“ aus Schritt 1 sorgfältig gelesen haben, können Sie mit der Probennahme beginnen. **Befolgen Sie die folgenden Schritte bitte streng nach Anleitung.** Nur so kann ein korrektes Messergebnis der Probe gewährleistet werden.

01

Nehmen Sie das Blutauffangröhrchen aus dem Versandgefäß und ziehen Sie den Deckel ab.

Stellen Sie das Blutauffangröhrchen in die dafür vorgesehene Haltevorrichtung.

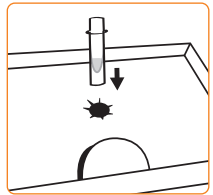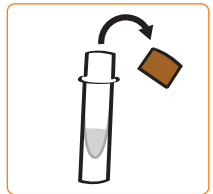


02

Desinfizieren Sie die Einstichstelle mit einem Alkoholtupfer. Bitte den Finger anschließend vollständig trocknen lassen!



03


Nehmen Sie die Lanzette zur Hand und entfernen Sie die Schutzkappe.

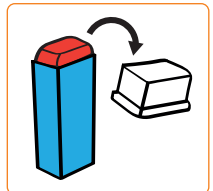

04


Spannen Sie die Haut mit dem Daumen. Setzen Sie die Lanzette fest auf die Einstichstelle im vorderen Bereich gegen die Fingerkuppe. Nun drücken Sie die Lanzette kräftig gegen die Fingerkuppe.

Ein wiederholtes Auslösen der Lanzette ist nicht möglich.

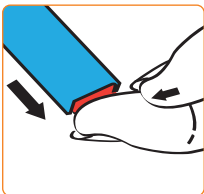


05

Wischen Sie den ersten Blutropfen mit der Zellulose-Kompresse weg.

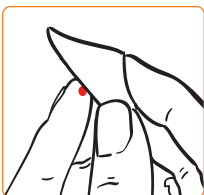

Lassen Sie das Blut am Rand des Blutauffangröhrchens bis zur oberen Markierung (500 µl) hineintropfen.

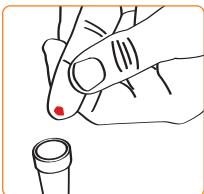


06

Durch Ausstreichen des Fingers vom Ansatz in Richtung Fingerkuppe können Sie die Bildung von Blutropfen unterstützen.

Falls die Probennahme länger als 5 bis 10 Minuten dauert, verschließen Sie zwischendurch das Blutauffangröhrchen und schwenken Sie es 3-4x über Kopf (siehe Abbildung 08).


07

Anschließend nehmen Sie das Blutauffangröhrchen aus der Haltevorrichtung und verschließen es, bis Sie ein deutliches Klicken hören.

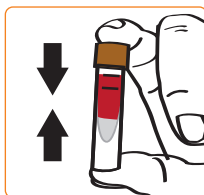

08

Schwenken Sie das Blut-
auffangröhrchen 3-4x über
Kopf.

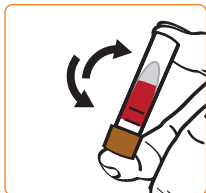

09

Wischen Sie die Einstich-
stelle mit dem Alkoholtupfer
ab und kleben das Pflaster
darüber.




10

Nehmen Sie nun ein
Barcode-Etikett vom Proben-
begleitschein und kleben
Sie dieses hochkant auf das
Blutauffangröhrchen.



11

Legen Sie das Blutauffang-
röhrchen in das Versandgefäß
und legen es unverzüglich bei
6-8 °C in den Kühlschrank. Bis
zum Probenversand, der am
gleichen Tag erfolgen sollte,
bewahren Sie die Probe bitte
im Kühlschrank auf.

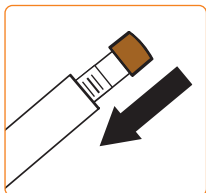

12

Die Lanzetten und die rest-
lich genutzten Materialien,
sowie die Verpackungen,
können im Hausmüll ent-
sorgt werden.



Schritt 4: TESTREGISTRIERUNG

Damit wir Ihre Analyse durchführen können, müssen Sie Ihren Test zunächst registrieren. Im unteren Bereich des Probenbegleitscheins befindet sich der Kundenabschnitt mit QR-Code.

- QR-Code scannen, um zum Kundenportal zu gelangen
- Persönliche Daten eingeben und Test registrieren
- Registrierung mit „Daten senden“ bestätigen
Wichtig: Test erst registrieren, wenn die Probe an das Labor gesendet wird
- Kundenabschnitt abtrennen und aufbewahren

Wir können Ihre eingegebenen Daten nur abrufen, wenn Sie Ihre Probe mit einem Barcode-Etikett bekleben.

Wenn Sie Ihren Test online registriert haben, müssen Sie den Probenbegleitschein nicht mitsenden.

Sollten Sie die Probe nicht online registrieren können, folgen Sie bitte der Anleitung auf dem Probenbegleitschein.

Schritt 5: PROBENVERSAND

Versenden Sie die Probe nicht vor dem Wochenende oder vor Feiertagen.

- Versandgefäß inkl. mit Barcode-Etikett beklebtes Probenmaterial in die beiliegende Versandtasche legen
- Probenbegleitschein nur beilegen, wenn der Test nicht online registriert wurde
- Alle Materialien auf Vollständigkeit und Mindestmenge prüfen in die Versandtasche geben, da sonst keine Laboranalyse möglich ist
- Schutzstreifen abziehen und Versandtasche zukleben
Achtung: Versandtasche ist danach nicht mehr zu öffnen
- Versandtasche umgehend an das Labor zurücksenden

Hinweise zur Befundabfrage

Download Ihres Befunds

Sind bei der Online-Registrierung der Seriennummer oder auf dem Probenbegleitschein alle persönlichen Daten vollständig eingetragen, wird Ihnen der Befund automatisch per Post zugestellt. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, den Befund vorab über das Internet abzurufen.

Wenn Sie einen anonymen Befund wünschen, tragen Sie bitte bei der Online-Registrierung der Seriennummer oder im beiliegenden Probenbegleitschein lediglich Ihr Geschlecht und Ihr Geburtsdatum ein. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall keine Zustellung per Post möglich ist. Zum Download Ihres Befundes gehen Sie bitte auf unsere Webseite www.medivere.de

Unter dem Link www.medivere.de/befundabfrage geben Sie die Serien- und die Codennummer Ihres Testsets ein. Diese finden Sie auf dem abtrennbaren Kundenabschnitt des Probenbegleitscheins. Anschließend wählen Sie Ihr Geburtsdatum aus und klicken auf „Daten absenden“, um Ihren persönlichen Befund zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass Ihr Befund nur 2 Jahre lang abrufbar ist. Falls Sie Ihren Befund zu einem späteren Zeitpunkt abrufen möchten, setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung.



Serien-Nr.:	Serien-Nr. (8-stellig)
Code:	Code (4-stellig)
Geburtsdatum:	TT.mm.JJJJ 
DATEN ABSENDEN	

QR-Code scannen, um direkt zur Befundabfrage geleitet zu werden.

Symbole und Beschreibungen auf der Etikettierung

	Hersteller
	Katalognummer
	Gebrauchsanweisung beachten
	Chargenbezeichnung
	Verwendbar bis (MM.JJJJ)
	Nicht wiederverwenden
	Trocken aufbewahren
	Temperaturgrenzwerte
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist und Gebrauchsanweisung beachten
	Vor Sonnenlicht schützen
	Achtung
	Mengenangabe der Verpackungseinheit
	Nutzung von Wertstoffen aus Abfällen
	Kann im Hausmüll entsorgt werden
	Unsteril
	Aufgrund der Abnahmemethode ist der Test erst bei Kindern ab 8 Jahren zu empfehlen
	Aluminium
	Strahlensterilisiert
	Latexfrei

Verwendungszweck: Behandlungseinheit zur Gewinnung einer humanen Probe und anschließender *in-vitro*-diagnostischer Untersuchung in einem Partnerlabor.

Garantie

Ihre Zufriedenheit mit unserem Produkt liegt uns sehr am Herzen. Sollte Ihr Testpaket nicht vollständig oder fehlerhaft gepackt sein oder Ihnen ist bei der Probennahme ein Fehler unterlaufen, kontaktieren Sie uns bitte unter:

+49 6131 7205-216 oder **reklamation@medivere.de**

Halten Sie bitte Ihren Probenbegleitschein bereit und entsorgen Sie diesen nicht. Die darauf stehende Serien- und Codenummer wird benötigt, um Ihnen neues, kostenfreies Probenmaterial zu senden.



medivere GmbH
Hans-Böckler-Str. 111
55128 Mainz

WAS WIRD GETESTET?

Messung des Ferritin-Spiegels im Blut, um einen Eisenmangel zu erkennen.

PROBENNAHME

 **BLUT**



Indikationen: Erschöpfung, brüchige Fingernägel, Hautprobleme, Kopfschmerzen

Verwendungszweck: Behandlungseinheit zur Gewinnung einer humanen Probe und anschließender *in-vitro*-diagnostischer Untersuchung in einem Partnerlabor.

Behandlungseinheit nach Artikel 22 der Verordnung (EU) 2017/745

Die medivere GmbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte entsprechend den Hinweisen der Hersteller geprüft, verpackt, die Benutzerhinweise der Hersteller einbezogen und die Zusammenstellung entsprechend den Vorgaben der internen Überwachung überprüft und validiert wurden.

EC	REP	Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague, The Netherlands
-----------	------------	---

 medivere GmbH
Hans-Böckler-Straße 111
55128 Mainz
www.medivere.de

REF	510008DE
------------	----------

LOT



QTY	1
------------	---

